



Orthèse de Hohmann



A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison de l'orthèse de Hohmann, faite sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Introduction

L'orthèse de Hohmann est un dispositif médical fabriqué sur mesure, à la suite d'une prescription médicale.

Mise en place

- Se coucher sur le dos à l'horizontal et plier le genou de la jambe saine pour prendre appui.
- Soulever les fesses. Glisser la partie lombaire et ajuster au niveau du pince-taille. Elle doit être posée sur les crêtes iliaques.
- Les sous-bandes doivent se joindre au milieu.
- Ensuite, glisser le cuissard par-dessous la jambe sans trop la manipuler.
- Fermer les velcros jusqu'aux marques indiquées par le technicien orthopédiste.
- Un serrage non approprié annule l'efficacité de l'appareil et crée des points d'appui.

Points importants à observer :

- il peut exister un jeu latéral entre le cuissard et la jambe ; il est dû à une abduction insuffisante de la jambe.
- avec l'élasticité de la peau, l'attelle peut bouger légèrement. Dans ce cas, il faut se recoucher et réajuster l'orthèse.

Suivi

Pour le suivi et les modifications : se conformer aux recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle pour la hanche. Pour toute modification de l'attelle de Hohmann, prendre contact avec GO pour convenir d'un rendez-vous.

Entretien

- Il est important d'avoir une hygiène quotidienne :
 - laver l'attelle une fois par jour avec de l'eau tiède et du savon au pH neutre. Bien éponger avec une serviette et laisser sécher à température ambiante environ 30 minutes.
 - ne pas utiliser de liquides contenant de l'alcool, de liquides abrasifs, de produits de nettoyage, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.

- Ne pas utiliser de matériaux et/ou produits abrasifs, brosses, laine d'acier, papier en fibre de verre, lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
- Ne pas faire tremper l'orthèse de Hohmann.
- Ne pas la laisser à la portée des animaux domestiques.

Remboursement : prise en charge

Contactez votre assurance.

Garantie

L'orthèse de Hohmann sur mesure est garantie 4 mois à partir de la date de livraison.

- Ce qui est considéré dans le cadre de la garantie :
 - uniquement les défauts des matériaux utilisés et les défauts de fabrication, s'ils sont reconnus défectueux par un technicien orthopédiste.
 - GO ne pourra être tenu pour responsable si le produit est utilisé dans les conditions énumérées ci-après comme non conforme.

Usage incorrect

- L'orthèse de Hohmann est fabriquée sur mesure et ne peut en aucun cas être portée par une tierce personne.
- Non-respect des règles et des instructions du fabricant.
- A des fins de guérison sans indication médicale.
- Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- Stockage inapproprié.
- Porter l'orthèse de Hohmann sur des sols ou des substances glissantes / grasses.
- Changement postural, morphologique, d'indication médicale.
- Toute modification non indiquée sur la prescription initiale.

Conseils

- Porter un t-shirt sous l'orthèse de Hohmann ou un maillot de corps.
- Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé d'enlever l'orthèse de Hohmann une fois par jour pour la nettoyer.
- En cas de rougeur irritative : appliquer du Bepanthen liquide (frictionner, puis laisser pénétrer avant de remettre l'orthèse de Hohmann). Resserrer l'orthèse de Hohmann pour éviter les frottements.
- Pour la douche, Il est recommandé de se munir d'un tapis anti-glisse et d'une chaise de douche.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS? NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER. T 022 309 48 48

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

Les mouvements à éviter en postopératoire après la voie antérieure : l'hyperextension en combinaison avec une rotation externe.

Les mouvements à éviter en postopératoire après la voie postérieure : la flexion-rotation interne de la hanche : aux toilettes, entrer et sortir du lit, s'accroupir ou enfiler des chaussettes.

L'orthèse lutte contre des mouvements qui peuvent provoquer une luxation. L'amplitude de la flexion et de l'extension est bloquée selon la demande du médecin. Souvent, une limitation de flexion (60°) et une limitation d'une hyper extension est demandée. La cuisse est en abduction (10°-15°). L'orthèse est montée, soit en rotation interne pour des luxations antérieures, soit en rotation externe pour des luxations postérieures.

Contraintes

Le port de l'orthèse de Hohmann est fait pour la position assise, debout et couchée. Il faut donc adapter l'environnement selon la posture. Quelle que soit la position (couchée, assise, debout) la jambe doit rester en abduction, sinon l'attelle pivote et crée des points d'appui sur le grand trochanter ou sous les côtes opposées de la hanche touchée.

En position couchée

Il est recommandé de dormir sur le dos.

En position assise

Respecter l'angle de l'attelle au risque de créer des problèmes sous les côtes. Pour le confort, il est possible de mettre un coussin au niveau de la partie lombaire afin de garder une lordose physiologique, ou s'asseoir sur une chaise haute.

En position debout

Il faut marcher avec la jambe écartée pour éviter toute contrainte sur la hanche et des pressions sur la peau.

Date de livraison

Technicien

En espérant avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions pour votre confiance !

Deux forces, une direction


GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch

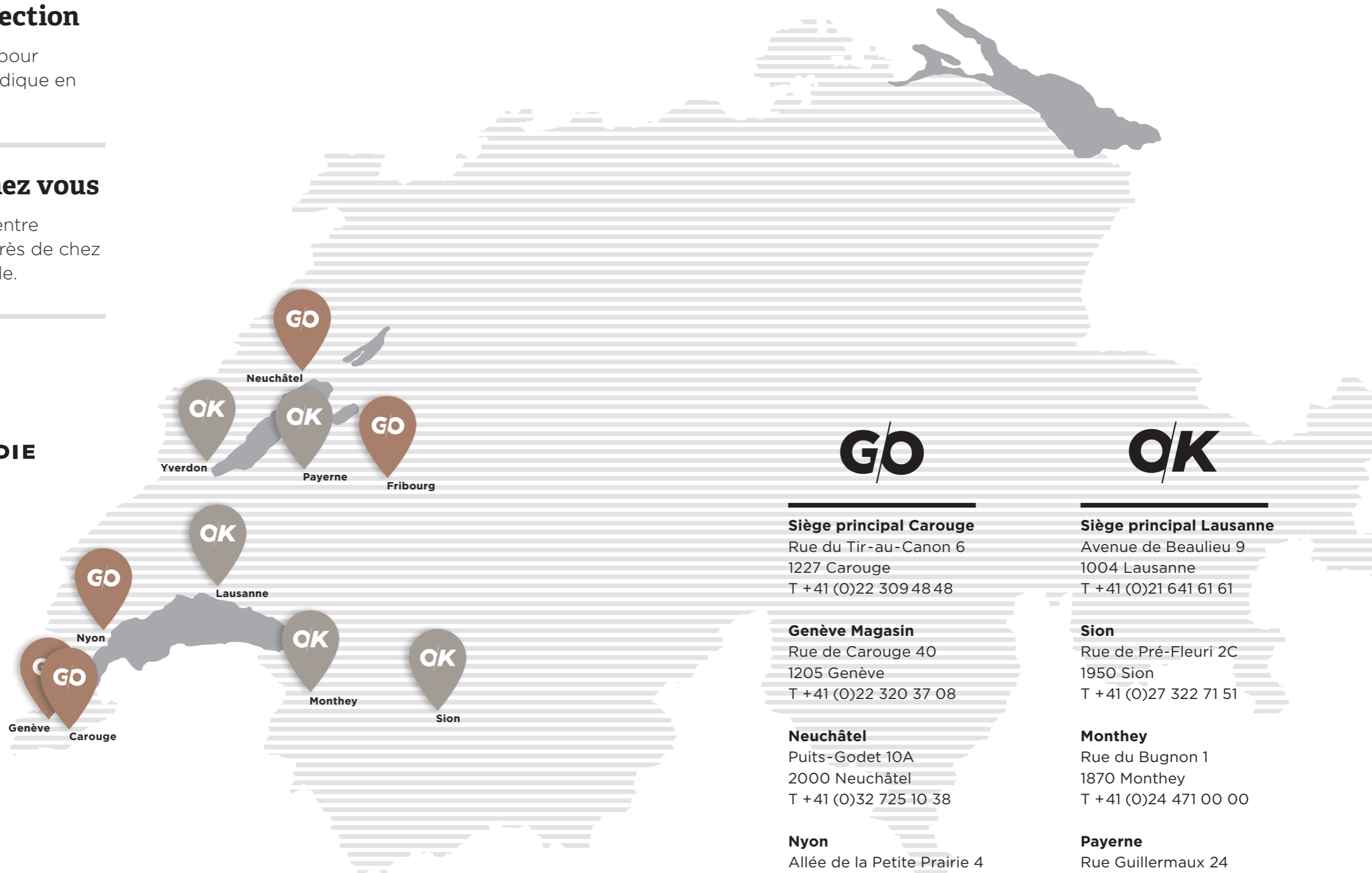

GO

Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



OK

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

