




# Corsets de fracture Corsets de maintien

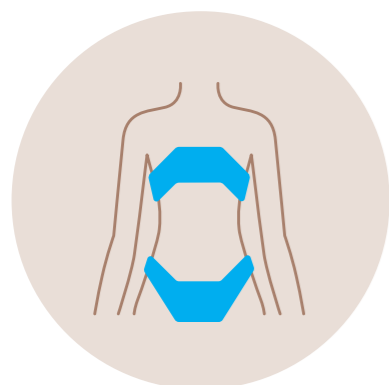

## A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison du corset, fait sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

### Introduction

Le corset sur mesure, fabriqué à la suite d'une prescription médicale, est un dispositif servant à immobiliser le rachis thoracique et lombaire.

### Mise en place

Corset lombaire type corset BOB, trois points monovalve, trois points bivalve, corset col d'officier, corset minerve.

- A partir de la position couchée sur le dos, fléchir les genoux et tourner d'un bloc sur le côté.
- Enfiler le corset par le côté pour un corset monovalve ou positionner la partie postérieure, en vous repérant avec le pince-taille, puis se remettre sur le dos.
- Vérifier la bonne position du corset : le pince-taille s'adapte d'office au-dessus des crêtes iliaques.

### Pour le corset BOB

- Serrer en premier le velcro du milieu, puis celui du bas et enfin celui du haut, jusqu'aux traits de serrage marqués par le technicien orthopédiste.

### Pour les autres corsets

- Passer les velcros dans les boucles et serrer jusqu'aux marques de serrage.
- Pour se lever : fléchir les genoux au corps et tourner d'un bloc sur le côté, s'aider des mains pour s'asseoir sur le bord du lit en utilisant les jambes comme balancier.
- Une fois assis, garder les yeux ouverts, attendre quelques minutes avant de se mettre debout, en regardant bien devant soi.

### Corset lombaire type COPAM

- Écarter le corset dans sa partie postérieure.
- Mettre le corset avec le palan dans le dos.
- Fermer le corset sur le ventre par chevauchement.
- Tirer la cordelette latéralement pour serrer le corset.
- Accrocher la boucle à une poignée de porte, puis effectuer un pas latéral, pivoter 1/4 de tour, accrocher la boucle à l'aide de son velcro.

### Suivi

Pour le suivi et les modifications, se conformer aux recommandations du médecin prescripteur concernant les rendez-vous de contrôle. Pour toute modifi-

cation du corset, prendre contact avec GO pour convenir d'un rendez-vous.

À la suite d'une fracture, le temps de consolidation d'un os est de 3 mois environ, en fonction des types d'os. Il est recommandé de porter le corset jour et nuit durant 45 jours. Après un examen de contrôle et un rendez-vous chez le médecin, le corset est à porter la journée durant 45 jours.

Pour tout autre indication, référez-vous aux indications de votre médecin prescripteur.

Pour tout autre lésion, il faut se conformer aux indications du médecin.

### Entretien

Il est important d'avoir une hygiène quotidienne.

- Ne pas utiliser de liquides contenant de l'alcool, de liquides abrasifs, de produits de nettoyage, d'alcool, détergents à lessive, eau de javel, ammoniac, solvants.
- Ne pas utiliser de matériaux et / ou produits abrasifs, brosses, laine d'acier, papier en fibre de verre, lames ou similaires, pour éliminer les taches ou les résidus.
- Ne pas laver en machine.
- Ne pas le laisser dans un véhicule par forte chaleur, ni sur un radiateur, ni au soleil.
- Ne pas le laisser à la portée des animaux domestiques

### Remboursement : prise en charge

Contactez votre assurance.

### Garantie

Le corset est garanti 4 mois à partir de la date de livraison.

Ce qui est considéré dans le cadre de la garantie :

- uniquement les défauts des matériaux utilisés et les défauts de fabrication, s'ils sont reconnus défectueux par un technicien orthopédiste.
- GO ne pourra être tenu pour responsable si le produit est utilisé dans les conditions énumérées ci-après comme non conforme.

### Usage incorrect

- Votre corset sur mesure ne peut en aucun cas être porté par une tierce personne.
- A des fins de guérison sans indication médicale.
- Modification de la structure en changeant / ajoutant des éléments, ou en chauffant.
- Utilisation de produits de nettoyage inappropriés
- Changement postural, morphologique, d'indication médicale.
- Toute modification non indiquée sur la prescription initiale.

**DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?  
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER.  
T 022 309 48 48**

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

### Conseils

- Porter un t-shirt sans couture sous la corset.
- Serrer le corset sur les traits de serrage.
- Pour la douche : retirer le corset, rester bien droit, se doucher sans se pencher. Il est recommandé de se munir d'un tapis anti-glisse et d'une chaise de douche.

### Contraintes

Le port d'un corset sert à un usage en position assise, debout et couchée. Le corset est surtout prescrit pour la mobilisation, la locomotion, et les transports. Il faut donc adapter votre environnement selon votre posture.

### En position debout

Comment se tenir droit : prendre une grande inspiration, rentrer le ventre, reculer les épaules. C'est dans cette posture que le corset doit tenir le rachis. Si des pressions importantes surviennent au bout de quelques temps, cela signifie que le rachis se courbe et n'est plus aligné. Faire l'effort d'échapper à ces appuis. Ne pas hésiter à resserrer un peu plus le corset et à refaire des marques sur les velcros, si la tenue est un peu lâche. Il n'y a pas de limite quant à la durée du maintien de la position debout, mais ne pas trop forcer.

### En position assise

Il est conseillé de s'asseoir en position haute, dans la position assis-debout. Sur une chaise normale, s'asseoir le dos bien droit sur le bord de la chaise. Éviter de s'appuyer contre le dossier.

### En position couchée

Dormir sur le dos sans oreiller, avec juste un cale nuque.

Si le dossier est surélevé, le corset a tendance à remonter et provoquer des appuis sous les bras. Dans cette position, il faut souvent remettre le corset en place.

Date de livraison.....

Technicien.....

En espérant vous avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions de votre confiance !

## Deux forces, une direction


**GO&OK**, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

## Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

**GO**  
**GIGLIO ORTHOPÉDIE**  
giglio-orthopedie.ch

**OK**  
**ORTHO KERN**  
ortho-kern.ch

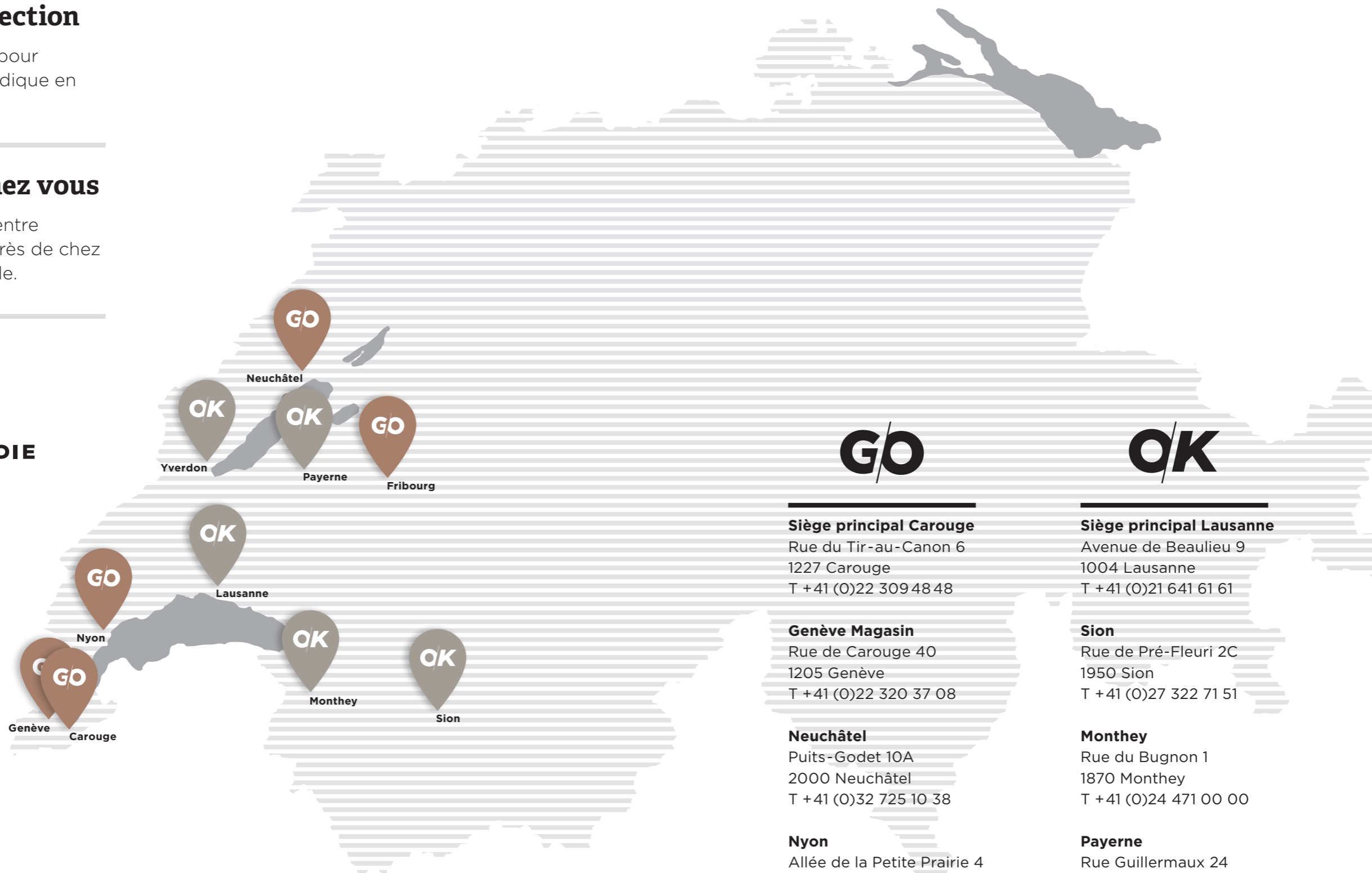

**Siège principal Carouge**  
Rue du Tir-au-Canon 6  
1227 Carouge  
T +41 (0)22 309 48 48

**Genève Magasin**  
Rue de Carouge 40  
1205 Genève  
T +41 (0)22 320 37 08

**Neuchâtel**  
Puits-Godet 10A  
2000 Neuchâtel  
T +41 (0)32 725 10 38

**Nyon**  
Allée de la Petite Prairie 4  
1260 Nyon  
T +41 (0)22 361 23 59

**Fribourg**  
Boulevard de Pérolles 24  
1700 Fribourg  
T +41 (0)26 321 39 03

[giglio-orthopedie.ch](http://giglio-orthopedie.ch)



**Siège principal Lausanne**  
Avenue de Beaulieu 9  
1004 Lausanne  
T +41 (0)21 641 61 61

**Sion**  
Rue de Pré-Fleuri 2C  
1950 Sion  
T +41 (0)27 322 71 51

**Monthey**  
Rue du Bugnon 1  
1870 Monthey  
T +41 (0)24 471 00 00

**Payerne**  
Rue Guillermaux 24  
1530 Payerne  
T +41 (0)26 660 02 02

**Yverdon**  
Avenue des Découvertes 3  
1400 Yverdon-les-Bains  
T +41 (0)24 425 13 13

[ortho-kern.ch](http://ortho-kern.ch)

