


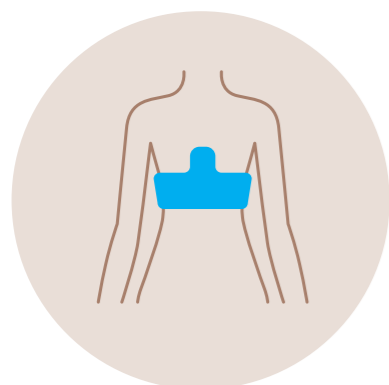

Corset pour pectus carinatum



A VOS MARQUES! PRÊTS! GO!

GO est heureux de guider ses patients au-delà de la livraison du corset fait sur mesure, sur la prescription d'un médecin. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration des orthèses, car la santé de nos patients nous tient particulièrement à cœur.

Introduction

Le corset sur mesure pour les pectus carinatum est un dispositif médical, fabriqué sur mesure, à la suite d'une prescription médicale.

Mise en place

- Placer le corset sur le thorax sans le fermer. La fermeture latérale doit se situer du même côté que la déformation.
- Boucler les bretelles et ajuster leur hauteur pour que le corset se situe à la hauteur de la déformation.
- Ajuster la position de la plaque de compression à l'aide de son support de façon à ce que la plaque se situe exactement sur la déformation.
- Fermer le corset avec la fermeture latérale verrouillée.

Suivi

Le temps d'adaptation d'environ 4 semaines se fait de manière progressive. Afin de s'assurer du bon déroulement du traitement et d'une pression constante et optimale, un rendez-vous sera fixé soit avec le médecin, soit avec le technicien orthopédiste une fois par mois en alternance. La durée du traitement dépend du patient, en particulier de la pression initiale de correction. Le traitement peut durer de quelques mois à plus d'un an. Lorsque la correction voulue est atteinte, il est recommandé de maintenir le traitement pendant quelques semaines pour conserver le résultat.

Remboursement : prise en charge

Le corset, destiné à un enfant, peut être pris en charge par l'assurance invalidité (AI) suite à une demande préalable ou par l'assurance maladie de base. Pour plus d'information, contacter votre assurance.

Entretien

Le corset doit être nettoyé avec du savon et de l'eau une fois par semaine. Bien rincer. Sécher complètement avant de remettre le corset.

Il faut vérifier une fois par semaine l'état du corset. Les vis qui se desserrent doivent être revissées en utilisant uniquement un tournevis manuel approprié. Si une vis est perdue, il faut rapporter le corset chez GO pour qu'il le remplace. Il peut parfois être nécessaire de recoller la mousse de protection.

- Ne pas mettre le corset en contact avec des surfaces ou des substances pouvant en altérer la surface.
- En cas de choc grave ou de défaut visible, le corset ne doit plus être utilisé.
- Ne pas modifier soi-même le corset, notre société ne pourrait alors engager sa responsabilité.
- Vérifier le bon serrage des vis.
- Le corset est fabriqué sur mesure pour un patient donné. Il ne peut être porté par une tierce personne.
- Le dispositif ne doit pas être assemblé ou modifié par le patient mais exclusivement par le praticien responsable du traitement.
- Ne pas assembler des éléments de diverses origines. Si tel était le cas, notre responsabilité ne pourrait être engagée.
- Ne pas laisser le corset à proximité d'une source de chaleur.

Conseils

Effets secondaires et complications possibles : inconfort, rougeurs, décoloration de la peau, ulcération de la peau, escarres, irritations, gêne respiratoire, douleurs (à la poitrine et au dos), mauvaise correction de la déformation.

Si des effets secondaires apparaissent, prendre contact avec le praticien en charge du traitement.

Soins de la peau

- Il est normal d'avoir des rougeurs et de ressentir une gêne, en particulier au début du traitement. Un test simple peut être pratiqué par le patient. En appuyant sur la zone rouge avec le doigt, la zone doit devenir blanche puis redevenir rouge quand on retire le doigt. Si la zone reste rouge, ne pas remettre le corset et contacter le praticien.
- Prendre quotidiennement une douche ou un bain.
 - Appliquer une solution Bepanthen et masser largement avec vos mains toutes les parties de peau couvertes par le corset et spécialement là où subsistent des marques d'appui marquant les zones par lesquelles s'effectue la correction.
 - Porter un t-shirt, coutures tournées vers l'extérieur.
 - Contrôler fréquemment la surface de la peau en début de traitement.

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?

T 022 309 48 48

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h30.

- Ne jamais utiliser de crème, d'onguent ou de talc sous le corset ; ces produits diminuent la résistance cutanée et peuvent être la cause de lésions importantes.
- Si, malgré des soins attentifs, une lésion cutanée profonde devait apparaître, abandonner le traitement pour 1 à 2 jour(s) et masser fréquemment la partie cutanée lésée à l'aide d'une lotion Bepanthen 5%. Lors de la reprise du traitement, poursuivre pendant quelques jours l'application de lotion Bepanthen en séchant bien la peau avant de mettre en place le corset.
- Eviter de dormir sur le ventre pendant toute la durée du traitement.

Réussite d'un corset pour pectus carinatum

Pour assurer le succès du traitement, le corset doit idéalement être porté 20 heures sur 24 heures, de jour comme de nuit, de manière continue. Il doit être retiré uniquement lors de la douche et de la pratique d'un sport.

Temps de port du corset : temps d'adaptation

1^{ère} semaine / 6 heures par jour

- Mettre le corset 4 heures le matin (la matinée scolaire).
- Quand l'enfant rentre de l'école, enlever le corset, s'essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.
- Remettre le corset pendant 2 heures l'après-midi après l'école.
- Après avoir enlevé le corset, s'essuyer le corps et mettre de la lotion Bepanthen sur les zones rouges.

2^{ème} semaine / 10 heures par jour

- Mettre le corset toute la nuit et en rentrant de l'école l'après-midi durant 2 heures de temps.

3^{ème} semaine / 16 heures par jour

- Comme la première semaine et le mettre également la nuit.

4^{ème} semaine / 18 heures par jour

- Porter le corset 20 heures sur 24.

Date de livraison
Technicien

En espérant vous avoir laissé une empreinte de qualité, nous vous remercions de votre confiance !

Deux forces, une direction


GO&OK, le bon vecteur pour le futur. La référence orthopédique en Suisse romande.

Toujours proche de chez vous

Grâce à la collaboration entre **GO&OK**, vous nous trouverez près de chez vous en Suisse romande.

GO
GIGLIO ORTHOPÉDIE
giglio-orthopedie.ch

OK
ORTHO KERN
ortho-kern.ch

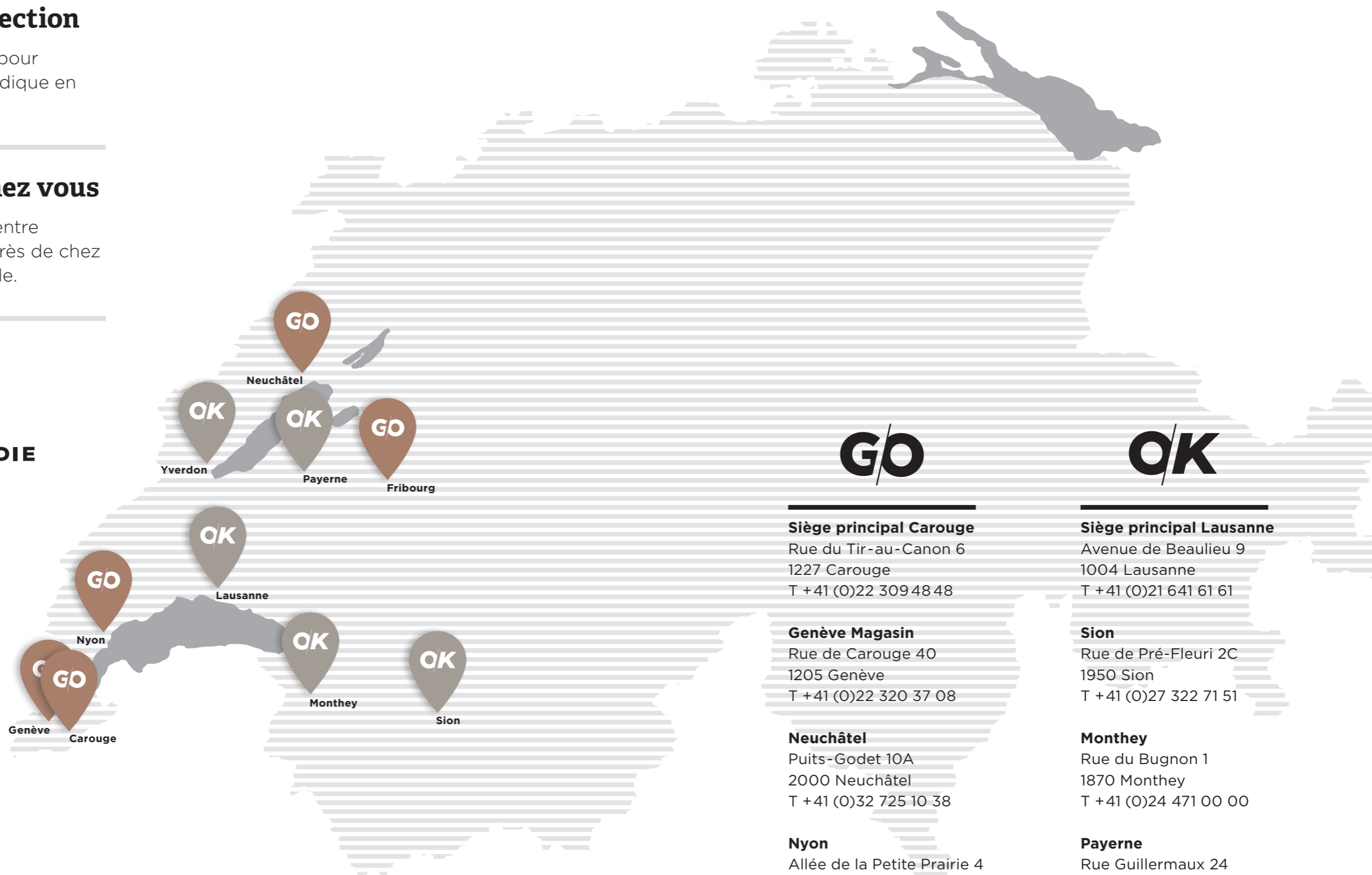

GO

Siège principal Carouge
Rue du Tir-au-Canon 6
1227 Carouge
T +41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40
1205 Genève
T +41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits-Godet 10A
2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch



OK

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T +41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T +41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T +41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T +41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

